

医療用品3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70976000
一般医療機器 歯科用手袋 JMDNコード 70911000
ソフトタッチ・ニトリルハンド エックス

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

オカモト株式会社 メディカル課
東京都文京区本郷3丁目27番12号
TEL 03-3817-4172

【形状・構造及び原理等】

- 左右同一型（平手タイプ）
- パウダーフリー
- 未滅菌
- 主原料：ニトリルゴムラテックス
- 表面仕上げ：粗面

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために又は化学療法剤調剤時の抗がん剤暴露の防止のために使用するニトリルゴム製手袋をいう。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 体質・使用状況によりかゆみ、かぶれ等の遅延性のアレルギー性症状（IV型－遅延型：主に添加剤等の化学物質による）を引き起こすことがある。装着後数時間後から症状が発現することがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。

2. 重要な基本的注意

- 複数の患者には使用しないこと。
- 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。

3. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認の上、使用する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。

2. 使用の期限

- 使用期限は包装に記載。
[自己認証（当社データ）による]